

Critère	Action d'évaluation	
45a-1	Evaluation des procédures de désinfection des endoscopes	<p>Choix de l'action Forte activité d'endoscopie en gastroentérologie et en pneumologie Alertes de l'AFSSAPS mettant en garde contre certains dysfonctionnements Recommandations de l'AFSSAPS (début 2005- ref DM RECO05-05/02 A1)</p> <p>Objectif poursuivi Prévenir le risque infectieux lié à l'endoscopie</p> <p>Objectifs principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluer les pratiques du Centre Hospitalier pour un éventuel rajustement - Mesurer l'observance de la bonne application des procédures de désinfection des endoscopes <p>Objectifs secondaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser le personnel concerné - Valoriser l'activité des professionnels concernés - Garantir la qualité du matériel d'endoscopie

		<p>Données de la littérature</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocole de nettoyage et de désinfection des endoscopes bronchiques - avril 2002, modif 2004- Centre Hospitalier de Charleville-Mézières • Protocole de nettoyage et de désinfection des endoscopes en endoscopie digestive - Mars 2002, modif 2004- Centre Hospitalier de Charleville-Mézières • Circulaire n° 591 du 17/12/2003 relative aux modalités de désinfection des endoscopes dans les lieux de soins • Bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux -Guide pour l'utilisation des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes - Novembre 2003 • Guide pour l'entretien manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive- Juin 2004 • Guide de l'acheteur public sur les laveurs désinfecteurs pour endoscopes -Achat- Maintenance- Fournitures des consommables associés du Groupe Permanent d'étude des Marchés d'équipement et de fournitures des centres de soins et des laboratoires (GPEM/SL) • Décisions de l'AFSSAPS du 17/02/2004 relatives à l'utilisation des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes (réf. DM-RECO 04/02) • Information du 19/05/2004 sur le contrôle de marché des désinfectants intitulée : »Nouvelles règles d'utilisation des désinfectants à base d'acide peracétique pour la désinfection manuelle des dispositifs médicaux thermosensibles » Réf RM-RECO 04/04
		<p>Méthode</p> <p>Audit des pratiques de prétraitement , de nettoyage , de désinfection des endoscopes Secteurs audités : secteur d'endoscopie digestive, secteur d'endoscopie bronchique</p>
		<p>Principaux résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> - La tenue réglementaire est observée dans la majorité des cas - Le petit matériel de nettoyage n'est pas à usage unique , cependant le circuit d'entretien est bien respecté - La procédure d'entretien est correcte dans les 2 services
		<p>Objectifs d'amélioration</p>

		<p>Actions d'amélioration</p> <ul style="list-style-type: none">- Le matériel : dotation supplémentaire en filtres , demande de kits à usage unique contenant un écouvillon pour canaux et un écouvillon pour orifices ainsi que des brosses pour les parties externes des endoscopes.- Revoir la procédure d'entretien manuel des endoscopes en cas de panne du laveur-désinfecteur dans le secteur de pneumologie. <p>Modalités de suivi</p> <ul style="list-style-type: none">- Surveillance microbiologique régulière des endoscopes par l'équipe de l'Unité d'Hygiène (résultats disponibles dans les services concernés et à l'Unité d'Hygiène)- Prévisions d'un nouvel audit des pratiques en 2007- Prévoir une analyse « a priori » des risques avant le futur déménagement du service de gastroentérologie (analyse détaillée de type AMDEC si possible)
--	--	---